

## MULTI-GYN FLORAPLUS È UN TRATTAMENTO PER I PROBLEMI DA CANDIDOSI VAGINALE

- + Sollievo immediato da prurito, irritazioni e perdite bianche e grumose
- + Contiene prebiotici
- + Ha il pH ideale per un ambiente vaginale sano
- + A base di ingredienti naturali

## INDICAZIONI

Donne che soffrono dei fastidiosi sintomi delle candidosi vaginali. Multi-Gyn FloraPlus è molto efficace per il trattamento della candidosi vaginale e dei disagi correlati come prurito, irritazioni e perdite bianche e grumose.

Questo prodotto non tratta e non previene le malattie a trasmissione sessuale.

## COME FUNZIONA MULTI-GYN FLORAPLUS

Multi-Gyn FloraPlus è a base di ingredienti naturali e del complesso 2QR brevettato in combinazione con prebiotici. Il complesso 2QR è un ingrediente naturale di origine vegetale che ha la capacità unica di impedire a batteri e lieviti nocivi di entrare in contatto con il tessuto e la mucosa vaginale. Nel frattempo, i prebiotici aiutano i lattobacilli "buoni" a ripristinare una flora vaginale ottimale. Questa combinazione unica rende Multi-Gyn FloraPlus ideale per il trattamento dei problemi derivati da candidosi vaginale e il ripristino della salute vaginale.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Per il trattamento dei problemi di candidosi vaginale, utilizzare 1 tubetto monodose appena prima di andare a dormire, per 5 giorni consecutivi. Se i disturbi persistono o si ripresentano, si consiglia di contattare il proprio medico. Multi-Gyn FloraPlus non deve essere utilizzato per più di 30 giorni consecutivi. Ciò consente alla flora vaginale di autoregolarsi senza ulteriore supporto.

## ATTENZIONE

Dopo l'applicazione si potrebbe avvertire una sensazione di bruciore e / o formicolio. Tale sensazione è normale e scompare rapidamente.

## MULTI-GYN FLORAPLUS È A BASE DI INGREDIENTI NATURALI

Multi-Gyn FloraPlus non contiene ormoni, ingredienti di origine animale o profumi.


## INGREDIENTI PRINCIPALI

Acido poliglicurico galattoarabico crosspolimero\*, Prebiotici (Lattitolo e FOS).

\* Complesso 2QR: ingrediente brevettato purificato da Aloe Barbadensis.


## COME USARE MULTI-GYN FLORAPLUS

Multi-Gyn FloraPlus è un gel vaginale prebiotico che viene applicato direttamente in vagina. Ogni tubetto contiene una dose per un'applicazione singola. I disegni sottostanti illustrano come utilizzare il tubetto monodose. Smaltire il tubetto dopo l'uso.

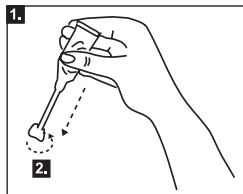


1. Agitare il contenuto del tubetto spingendolo verso la punta del tubetto.


2. Rompere la punta del tubetto ruotandola.

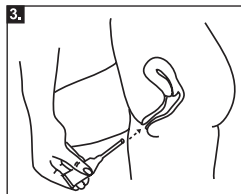

3. Inserire delicatamente l'estremità sottile dell'applicatore (del tubetto) nella vagina.

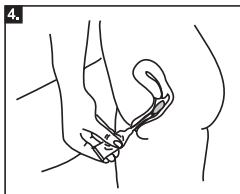

4. Premere delicatamente il tubetto per applicare il gel all'interno della vagina.

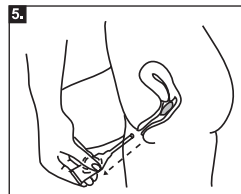

5. Continuare a spremere il tubetto mentre lo si rimuove.

**Nota: il tubetto è concepito per applicare la quantità raccomandata di gel. Se usato come indicato, una piccola quantità di gel rimarrà nel tubetto.**

## INFORMAZIONI SU ALLERGIE

Le allergie agli ingredienti di Multi-Gyn FloraPlus sono molto rare. In caso di dubbi, provare una piccola quantità di prodotto all'interno del braccio. Se compare una macchiolina o una chiazza di colore rosso e pruriginosa, si consiglia di non usare Multi-Gyn FloraPlus.

## EFFETTI COLLATERALI

Non esistono effetti collaterali noti. Tuttavia, poiché Multi-Gyn FloraPlus ha un'acidità ottimale (pH basso) per la vagina e lo sperma è alcalino (pH elevato), l'uso di Multi-Gyn FloraPlus può ridurre l'attività degli spermatozoi. Si consiglia pertanto di non usare Multi-Gyn FloraPlus durante il periodo di ovulazione quando si desidera una gravidanza.

## INTERAZIONI CON I FARMACI

Multi-Gyn FloraPlus non ha interazioni note con i farmaci.

## GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Non esistono controindicazioni note all'uso di Multi-Gyn FloraPlus durante la gravidanza e l'allattamento. Si consiglia di consultarsi con il proprio medico.

## UTILIZZO CON PRESERVATIVI E PESSARI

L'effetto di Multi-Gyn FloraPlus su pessario e preservativi non è noto.

## CONSERVAZIONE

Conservare Multi-Gyn FloraPlus a una temperatura compresa tra 10 ° C e 25 ° C (temperatura ambiente). Tenere Multi-Gyn FloraPlus fuori dalla portata dei bambini. Non usare Multi-Gyn FloraPlus dopo la data di scadenza.

## INFORMAZIONI DI BASE

Un ambiente vaginale sano ospita un insieme di diversi batteri in equilibrio tra loro: la flora vaginale. Quando l'ambiente naturale o il pH della vagina vengono disturbati, batteri e microbi dannosi possono prosperare. L'alterazione di questo equilibrio è spesso rilevata da un cambiamento nelle secrezioni vaginali. I problemi più comuni sono la proliferazione batterica nota come vaginosi batterica (VB) e le infezioni da lievito vaginale (candida, mugugno). La vaginosi batterica è per lo più accompagnata da uno sgradevole odore di pesce, mentre le infezioni da lievito vaginale si accompagnano a prurito, sensazione di bruciore e perdite bianche e grumose.